


MODE D'EMPLOI

A-dec® 300 Pro

SYSTÈMES DE
DISTRIBUTION

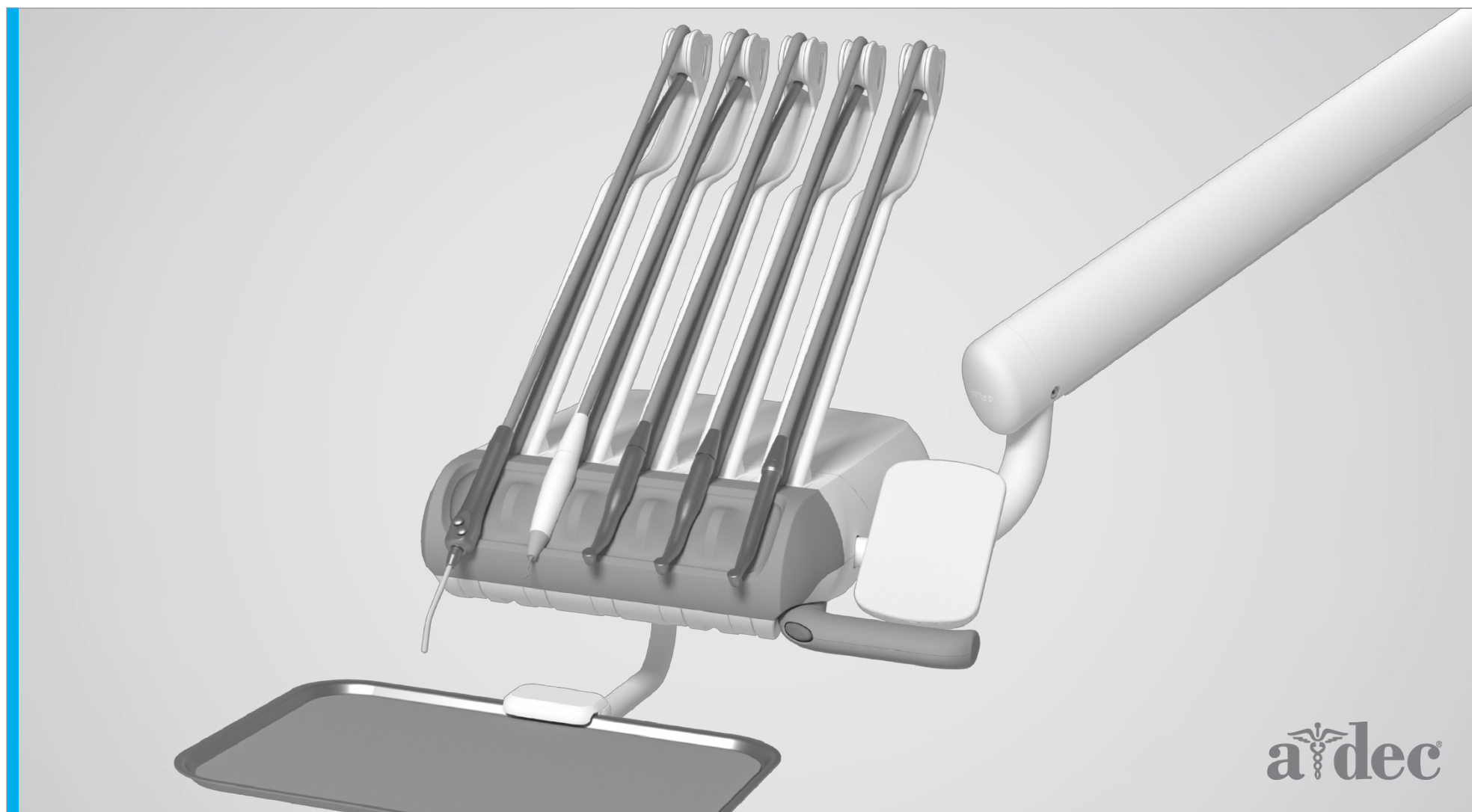

a dec®

Copyright

© 2026 A-dec, Inc. Tous droits réservés.

A-dec, Inc. n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce document, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. A-dec, Inc. ne saurait être tenue responsable des erreurs contenues dans le présent document ni des dommages indirects ou autres liés à la fourniture, aux performances ou à l'utilisation de ce document. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Si vous constatez des problèmes dans la documentation, veuillez nous les signaler par écrit. A-dec, Inc. ne garantit pas que ce document est exempt d'erreurs.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite, modifiée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, enregistrement ou par tout système de stockage et de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite préalable de A-dec, Inc.

Droits de propriété intellectuelle

Aucune des marques commerciales, noms commerciaux ou symboles et icônes propriétaires figurant dans le présent document ne peut être reproduit, copié ou manipulé de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite expresse du propriétaire de la marque commerciale.

A-dec, A-dec+, le logo A-dec et les marques commerciales répertoriées sur a-dec.com/legal/trademarks sont des marques commerciales ou des marques déposées d'A-dec aux États-Unis et

autres pays. Certains symboles et icônes de commande tactile sont la propriété exclusive de A-dec, Inc.

Informations réglementaires et garantie

Pour obtenir les informations réglementaires requises et la garantie A-dec, consultez le document *Informations réglementaires, spécifications et garantie* (réf. 86.0221.00) disponible dans le Centre de ressources à l'adresse www.a-dec.com.



Pour accéder rapidement à ce document en ligne, scannez, appuyez ou cliquez sur ce code QR, qui renvoie vers : a-dec.com/regulatory-guide.

Service après-vente

Le service après-vente est assuré par votre revendeur A-dec agréé local. Pour obtenir des informations sur le service après-vente ou pour trouver un revendeur agréé, contactez A-dec au 1.800.547.1883 aux États-Unis et au Canada ou au +1.503.538.7478 dans le reste du monde, ou rendez-vous sur www.a-dec.com.

Modèles et versions de produits couverts dans ce document*

Modèles	Versions	Description
332pro/333pro 334pro/335pro 336pro/342pro	n/a	Système de distribution

* L'équipement présenté dans ce document peut inclure des fonctionnalités ou des accessoires en option. Certains produits, versions et options présentés dans ce document peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions.

Plan du contenu

Écran tactile/Pavé de commande6



Commutateur principal2



Collecteur d'huile17



Support de plateau11



Bras flexible4, 9, 13



Bouteille d'eau17




Fonctionnement/Réglage	2
Nettoyage/Entretien	14
Spécifications	19

(système de distribution 332pro illustré)

Fonctionnement/Réglage

Allumer/éteindre l'air, l'eau et l'alimentation électrique

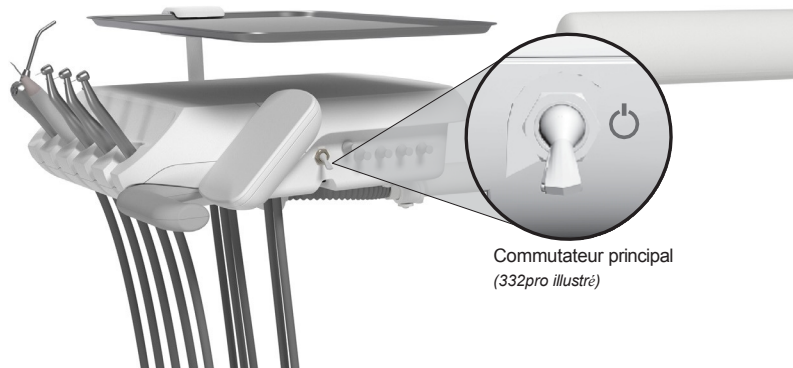

Commutateur principal
(332pro illustré)




REMARQUE A-dec recommande d'effectuer un traitement choc sur les conduites d'eau de l'unité dentaire avant d'utiliser le système pour la première fois. Pour plus d'informations, voir « Entretien des conduites d'eau » à la page 17.

Commutateur principal

Utilisez le commutateur principal pour mettre en marche l'air, l'eau et l'alimentation du système. Si le système n'est pas alimenté, vérifiez que le bouton d'alimentation du fauteuil est enfoncé. Ce bouton doit être activé pour que le commutateur principal puisse contrôler l'alimentation du système.

Quand couper l'alimentation

Pour économiser de l'énergie et réduire le risque de fuites d'air, appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le système hors tension à la fin de la journée et avant toute période d'inutilisation prolongée.

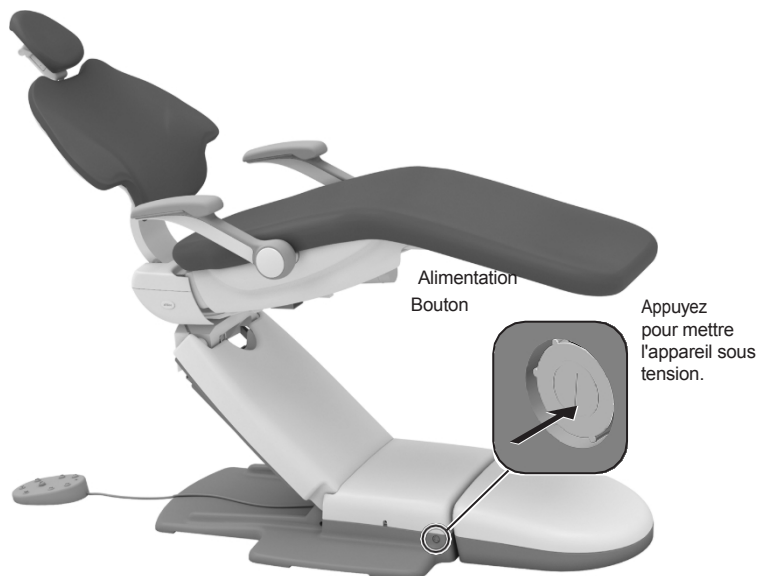

Alimentation
Bouton

Appuyez
pour mettre
l'appareil sous
tension.

Caractéristiques de sécurité du fauteuil




Les fauteuils et systèmes dentaires A-dec sont équipés de dispositifs de sécurité (tels que la plaque d'arrêt du fauteuil) qui peuvent arrêter ou empêcher le fauteuil de bouger. Cela peut se produire pour l'une des raisons suivantes :

- Il y a un obstacle sous le fauteuil ou le module fixé.
- Le disque ou le levier de la commande au pied est enfoncé.
- Une pièce à main n'est pas correctement positionnée dans son support.



REMARQUE Si le fauteuil s'arrête de manière inattendue ou ne bouge pas, vérifiez et corrigez l'une des conditions énumérées ci-dessus. Si un obstacle bloque le mouvement du fauteuil, utilisez le panneau de commande ou la pédale pour relever le fauteuil, puis retirez l'obstacle.

Utilisation de la seringue autoclavable

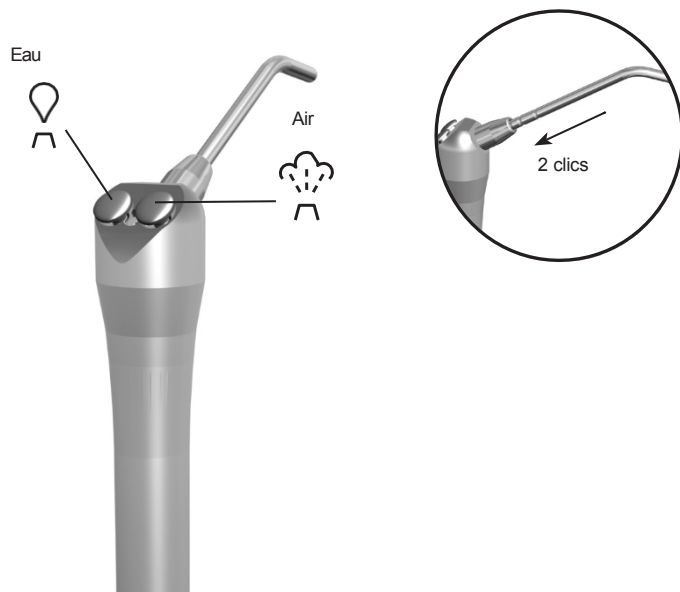


Pour installer l'embout de la seringue A-dec, enfoncez-le jusqu'à ce que vous sentiez deux clics. Appuyez simultanément sur les deux boutons pour obtenir un jet d'air/d'eau.



IMPORTANT Pour plus de détails sur l'utilisation et l'entretien de la seringue, consultez le mode d'emploi de la seringue A-dec.


Positionner le système d'administration

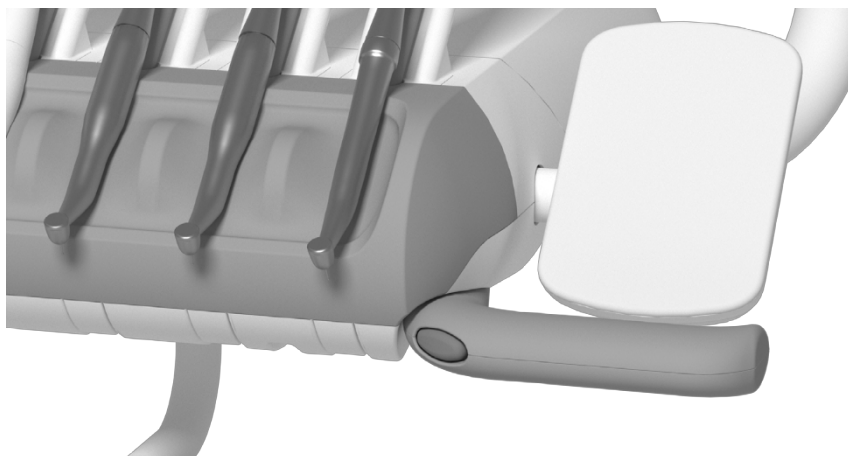

Frein Flexarm (systèmes 332pro/333pro/334pro/335pro uniquement)

Sur les systèmes équipés d'un bras flexible à contrepoids, un frein intégré maintient la tête de commande en position verticale (avec un poids supplémentaire pouvant atteindre 1,8 kg). Le frein ne limite pas les mouvements latéraux. Pour régler la hauteur de la tête de commande :

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour désengager le frein pendant que vous positionnez la tête de commande.
2. Relâchez le bouton pour enclencher le frein.

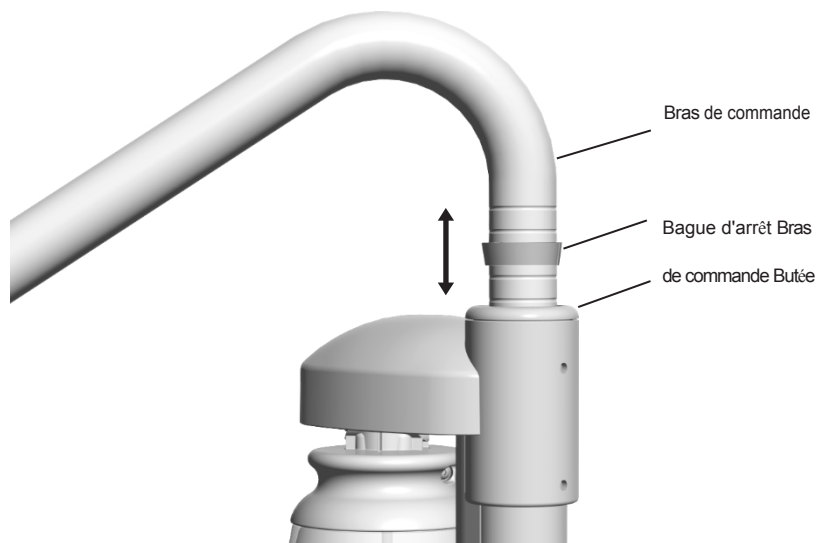

Réglage manuel de la hauteur (système 336pro uniquement)

Pour régler la hauteur de la tête de commande sur les systèmes à réglage manuel de la hauteur :



1. Soulevez le bras de commande.



REMARQUE La plage de réglage en hauteur du bras de commande est la suivante
5" (127 mm).

2. Faites glisser la bague d'arrêt jusqu'à la rainure de hauteur souhaitée.
3. Abaissez le bras de commande et la bague d'arrêt dans la butée du bras de commande.

Actionnez la commande au pied

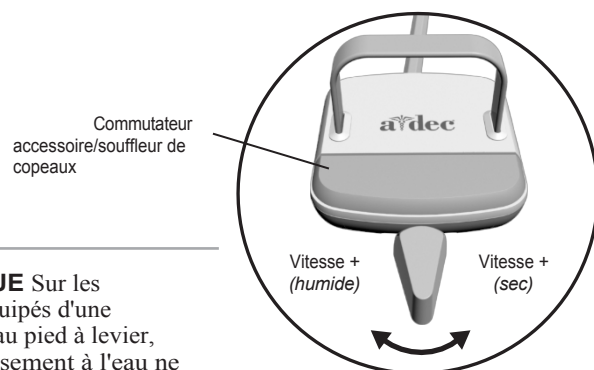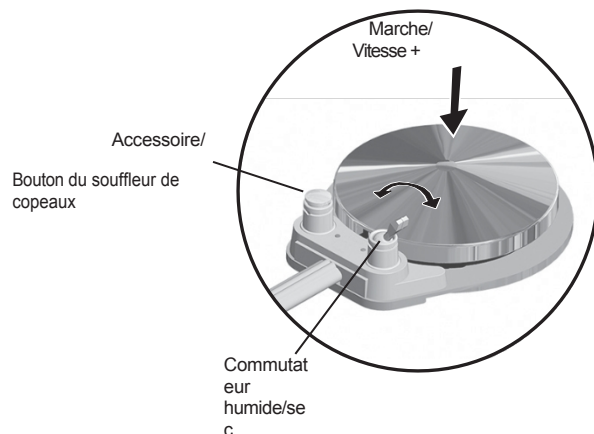

REMARQUE Sur les systèmes équipés d'une commande au pied à levier, Le refroidissement à l'eau ne peut pas être activé ou désactivé à partir du panneau de commande.



REMARQUE La fonction humide/sec de la commande au pied à levier peut être inversée par un technicien (changer la direction gauche pour sec, direction droite pour humide). Pour plus de détails, contactez votre revendeur A-dec agréé.

Pour activer une pièce à main, soulevez-la de son support ou tirez le câble vers l'avant. Utilisez la commande au pied pour effectuer l'opération souhaitée avec la pièce à main.

Commande	Fonctionnement	Procédure
Disque Commande au pied	Utilisez une pièce à main.	Appuyez sur le disque. Appuyez vers le bas pour augmenter la vitesse.
	Utilisez une pièce à main avec ou sans refroidissement à l'eau.	Utilisez le pavé de commande ou basculez le sélecteur humide/sec pour activer ou désactiver le refroidissement. Appuyez ensuite sur le disque.
	Utilisez l'accessoire optionnel/souffleur de copeaux.	Appuyez sur le bouton de l'accessoire/souffleur de copeaux.
	Utilisez la caméra intra-orale.	Appuyez sur le disque pour capturer une image.
Lever Commande au pied	Utilisez une pièce à main avec un système de refroidissement à eau.	Déplacez le levier vers la gauche. Déplacez-le davantage pour augmenter la vitesse.
	Utiliser une pièce à main sans refroidissement à l'eau.	Déplacez le levier vers la droite. Déplacez-le davantage pour augmenter la vitesse.
	Utiliser l'accessoire optionnel ou le souffleur de copeaux.	Appuyez sur l'interrupteur de l'accessoire/souffleur de copeaux.*
	Utiliser la caméra intra-orale.	Déplacez le levier vers la gauche ou vers la droite pour capturer une image.

* Contactez votre revendeur A-dec agréé pour toute question concernant le fonctionnement ou la configuration de vos appareils cliniques intégrés approuvés par A-dec.

Pour régler le liquide de refroidissement de la pièce à main, voir page 7.

A-dec Écrans tactiles/pavés de commande*



Pour l'utilisation de l'écran tactile et du pavé de commande, consultez le *Mode d'emploi des commandes tactiles A-dec DS7/DS5/CP5i/CP5* (réf. 86.0857.00) sur a-dec.com/touchscreen-manual.



Pour configurer les fonctionnalités de connectivité, consultez *le mode d'emploi de la plateforme logicielle A-dec+™* (réf. 86.1030.00) sur a-dec.com/connectivity-manual.





* *Remarque.* Les symboles et icônes de commande tactile sont la propriété exclusive d'A-dec, Inc.

Réglage du jet de refroidissement de la pièce à main



ATTENTION Lorsque vous effectuez cette procédure, n'essayez pas de couper complètement le débit d'eau ou d'air. Les boutons de réglage ne sont pas conçus pour couper complètement le débit et peuvent endommager le bloc de commande si vous appliquez une force excessive.

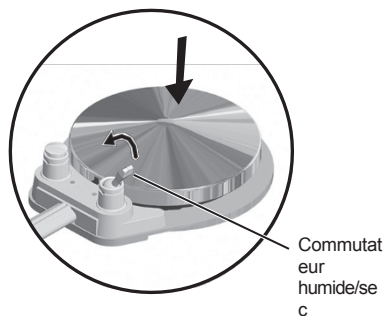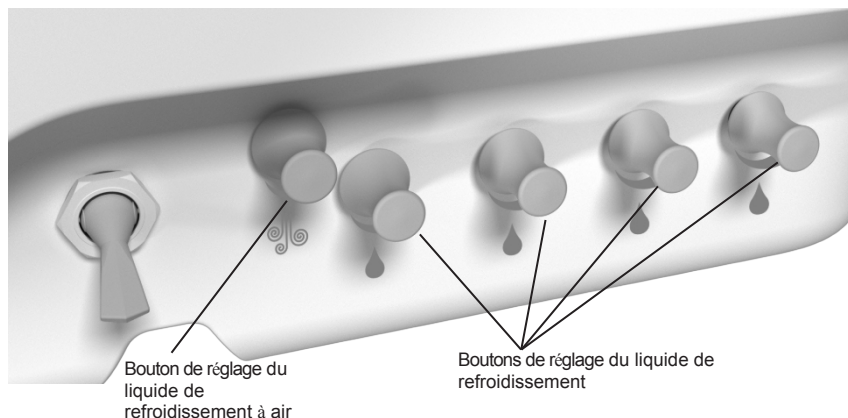

Commande au pied à disque



Commande au pied à levier

Le bouton de refroidissement à air de votre système d'alimentation ajuste simultanément le débit d'air vers toutes les positions de la pièce à main. Chaque bouton de refroidissement à eau ajuste le débit d'eau vers une seule position. Procédez comme suit pour régler l'atomisation du liquide de refroidissement de la pièce à main souhaitée :


1. Insérez une fraise dans chaque pièce à main que vous réglez.
2. Tournez le bouton de réglage du refroidissement à l'air dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le refroidissement à l'air s'arrête.
3. Retirez une pièce à main et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - **Commande à pédale à disque** : basculez le commutateur humide/sec sur humide et appuyez à fond sur le disque.
 - **Commande au pied à levier** : déplacez le levier complètement sur le côté pour l'eau.
4. Repérez le bouton de réglage du liquide de refroidissement pour la position de la pièce à main que vous réglez et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le débit de liquide de refroidissement s'arrête.
5. Tournez lentement le bouton de réglage du liquide de refroidissement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que des gouttelettes d'eau s'échappent de chaque orifice d'eau de la tête de la pièce à main. Remplacez la pièce à main dans son support.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque pièce à main.
7. Pour régler le jet de liquide de refroidissement, retirez une pièce à main et tournez le bouton de réglage du refroidissement à l'air dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir l'atomisation souhaitée au niveau de la surface de coupe de la fraise.



ATTENTION Ne continuez pas à tourner le bouton de réglage du refroidissement à l'air dans le sens inverse des aiguilles d'une montre une fois que le refroidissement à l'air cesse d'augmenter. La tige pourrait sortir du bloc de commande.




8. Si vous avez besoin de plus de liquide de refroidissement, augmentez le débit d'eau à l'étape 5 selon vos besoins.

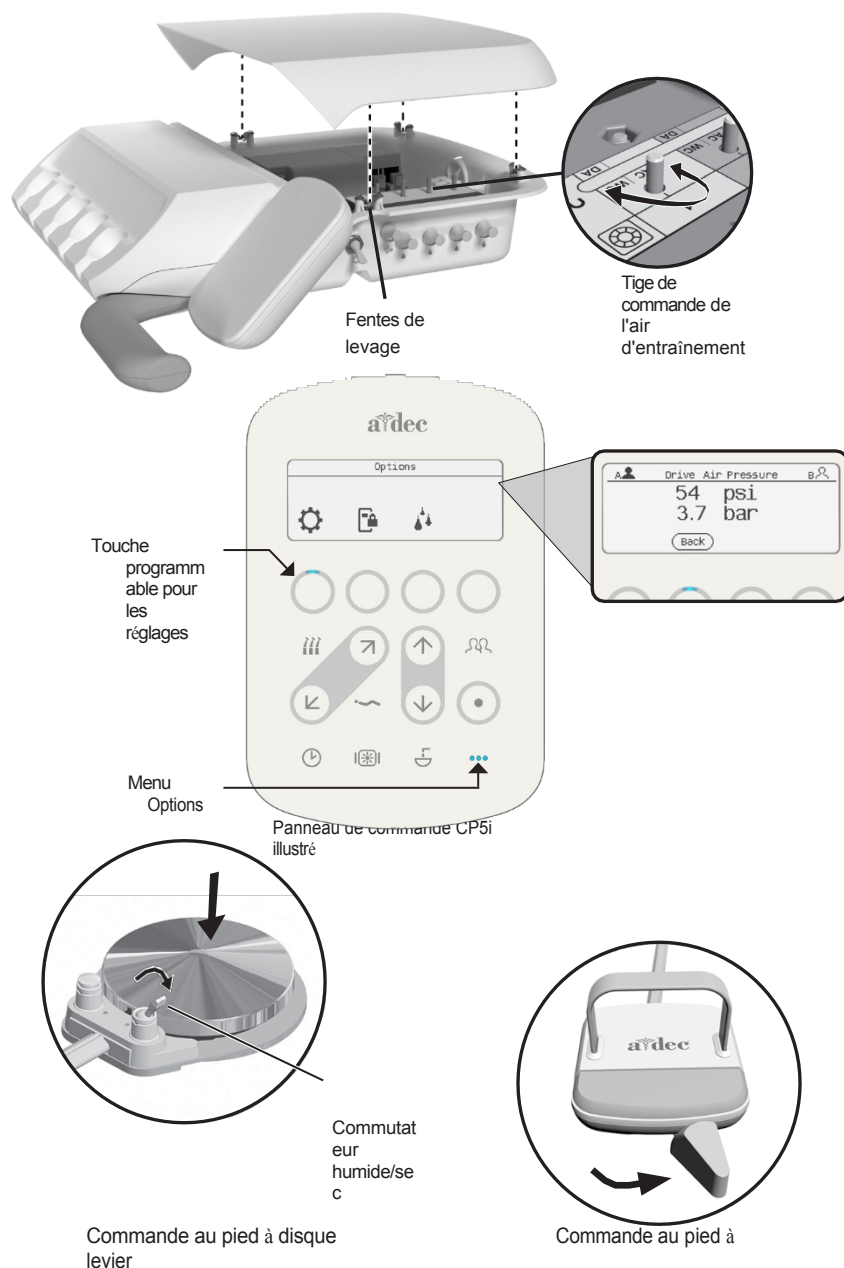Réglage de la pression d'air d'entraînement de la pièce à main



REMARQUE La pression d'air d'entraînement peut être inférieure à celle indiquée sur la commande tactile au niveau de la pièce à main. La pression peut également être mesurée à l'aide d'un manomètre pour pièce à main.


Pour régler la pression d'air d'entraînement de chaque pièce à main :

- Repérez les fentes de levage situées dans les coins avant de la tête de commande et tirez le couvercle vers le haut pour le dégager de la tête de commande, puis soulevez le couvercle aux quatre coins pour le retirer de la tête de commande. Repérez les commandes de pression d'air d'entraînement à l'intérieur.
- Accédez à l'écran **Drive Air (Air d'entraînement)** sur l'écran tactile ou le panneau de commande :
 - **Écran tactile** : sélectionnez «  » (**Paramètres**) pour accéder aux **paramètres**, puis sélectionnez « **System Info** » (**Informations système**) > « **System Diagnostics** » (**Diagnostics système**) > « **Drive Air** » (**Air d'entraînement**).
 - **Pavé de commande** : appuyez sur «  » (**Options**) pour accéder au menu **Options**, puis appuyez sur la touche programmable sous l'icône «  » (**Diagnostic**) et sélectionnez « **Diagnostics** » (**Diagnostic**). Faites défiler vers le bas et sélectionnez « **Drive Air Pressure** » (**Pression d'air d'entraînement**).
- Retirez une pièce à main.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - **Commande au pied du disque** : basculez le commutateur humide/sec sur sec, puis appuyez à fond sur le disque.
 - **Commande au pied à levier** : déplacez le levier complètement sur le côté pour faire entrer l'air.
- Vérifiez l'écran tactile/le pavé de commande pour afficher la pression.
- Réglez la pression d'air de la pièce à main conformément aux spécifications du fabricant. Tournez la tige de commande dans le sens horaire pour réduire le débit et dans le sens antihoraire pour l'augmenter.



ATTENTION Le dépassement de la pression d'air d'entraînement recommandée par le fabricant augmente le risque de dommages et peut réduire considérablement la durée de vie des composants de votre pièce à main. Pour connaître la pression d'air d'entraînement appropriée, consultez le mode d'emploi du fabricant de la pièce à main.

Réglage de la tête de commande et de la rotation du bras

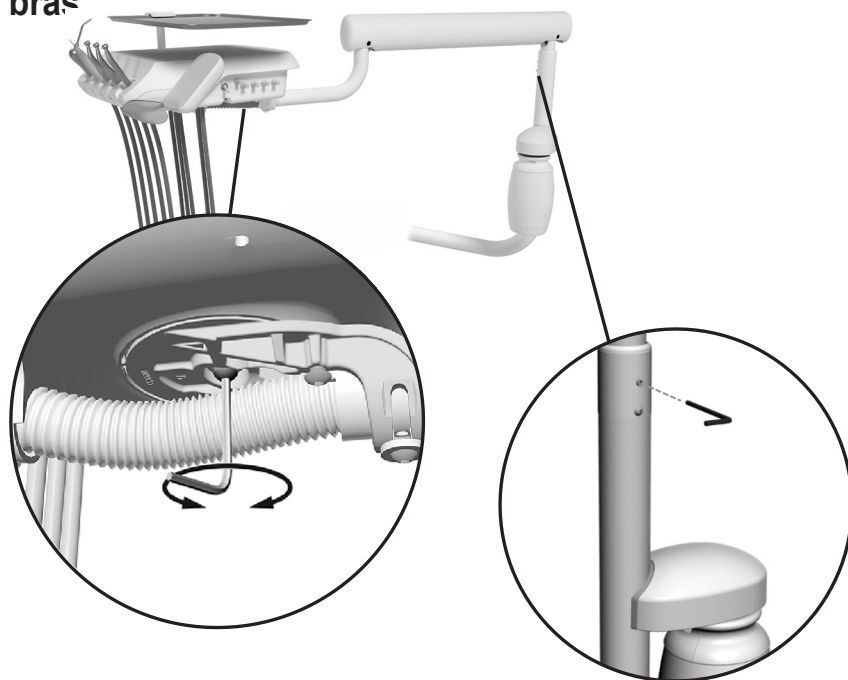

Tête de commande


Si la tête de commande est trop lâche ou difficile à tourner, utilisez une clé hexagonale de 5/32 po pour régler la vis de tension située sous la tête de commande.

Bras flexible (systèmes 332pro/333pro/334pro/335pro uniquement)


Si la tête de commande commence à dériver vers la droite ou vers la gauche, utilisez une clé hexagonale de 1/8" pour régler la tension de la vis de réglage de la rotation du bras flexible.

Bras de commande (système 336pro uniquement)

Si le bras de commande est difficile à soulever ou à tourner, ou s'il tourne trop librement, utilisez une clé hexagonale de 3/32" pour régler les deux vis de réglage de tension. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension.

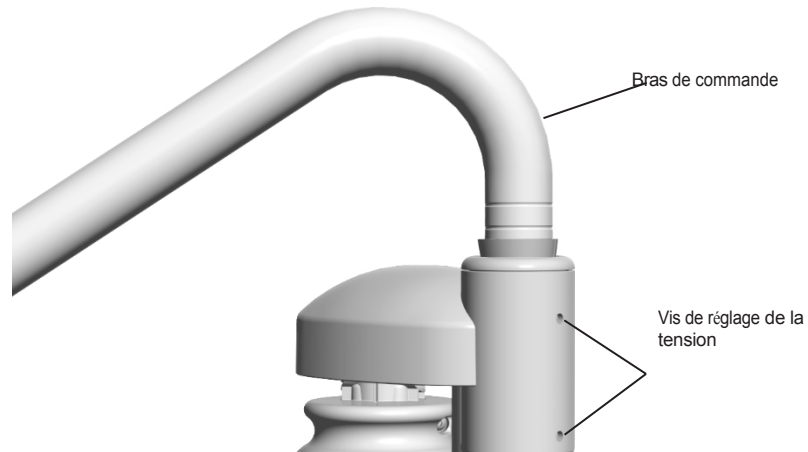

Réglage de la tête de commande et de la rotation du bras *(suite)*

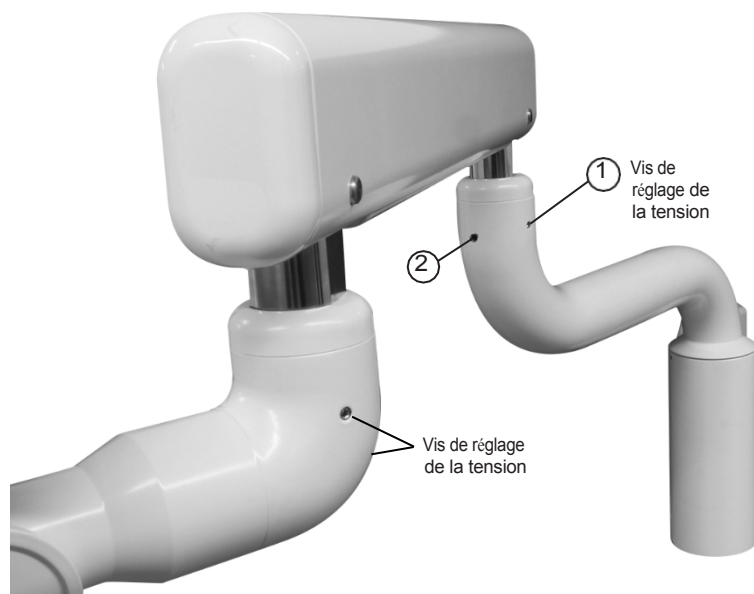


Rotation du bras flexible *(système 342pro uniquement)*

1. Utilisez une clé hexagonale de 3/32 po pour régler la tension de la vis de réglage. Elle doit être suffisamment serrée pour ne pas bouger, mais pas trop pour pouvoir être déplacée facilement. Tournez dans le sens horaire pour augmenter la tension.
2. Une fois la tension réglée, utilisez la même clé hexagonale pour serrer l'autre vis de réglage jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.

Rotation du bras de commande *(système 342pro uniquement)*



Utilisez une clé hexagonale de 3/32" pour régler les deux vis de réglage de tension de manière égale. Tournez dans le sens horaire pour augmenter la tension.

Réglage de la rotation du support du plateau

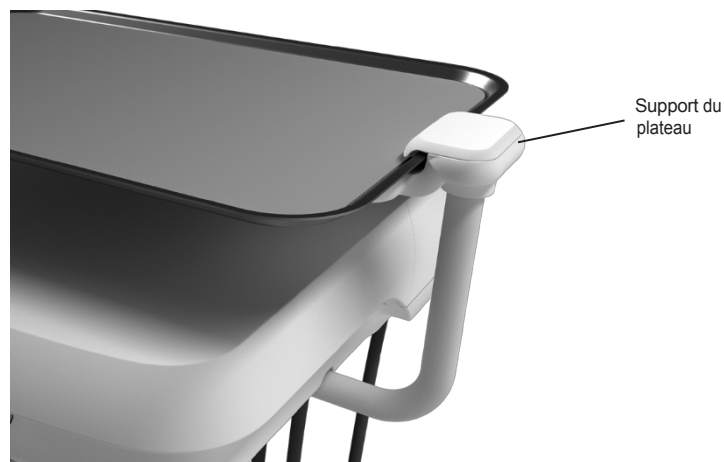

Si la rotation du support du plateau est trop serrée ou trop lâche, utilisez une clé hexagonale de 7/32" pour régler la tension :

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis qui maintiennent le capuchon. Retirez le capuchon.
2. Insérez la clé hexagonale dans le boulon de tension et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension.

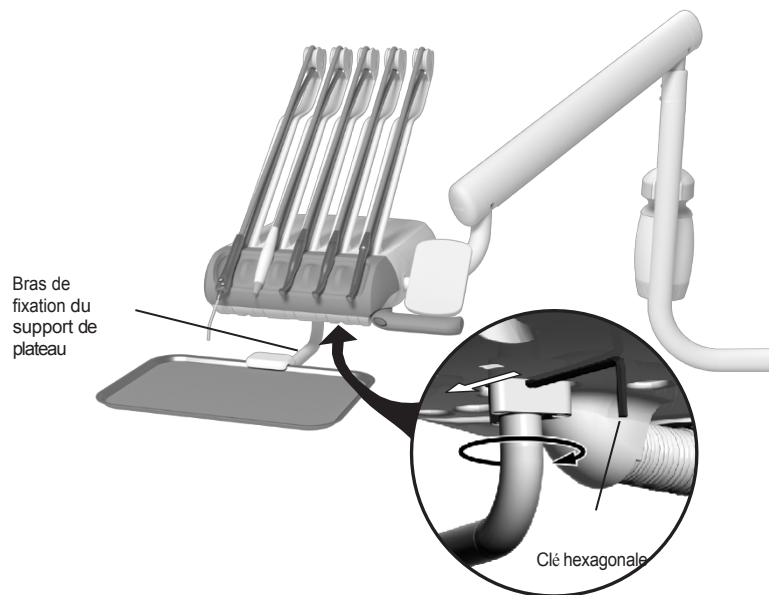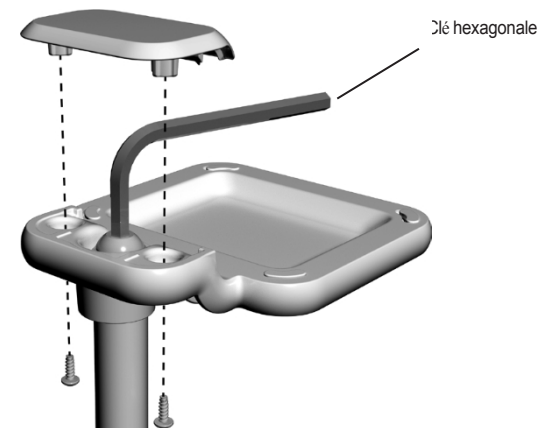


Systèmes Continental®uniquement

Pour les systèmes 333pro Continental, vous pouvez également régler la rotation du bras de fixation du support de plateau sous la tête de commande. Pour régler :

1. Insérez une clé hexagonale de 9/64" dans le support de montage. Si nécessaire, faites pivoter le bras de fixation du support de plateau jusqu'à ce que la clé hexagonale s'enfonce complètement dans le support de montage.
2. Tout en maintenant le support immobile à l'aide de la clé hexagonale, tournez le bras pour régler la tension. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la tension.


Réglage de la tension du bras flexible (systèmes 332pro/333pro/334pro/335pro uniquement)

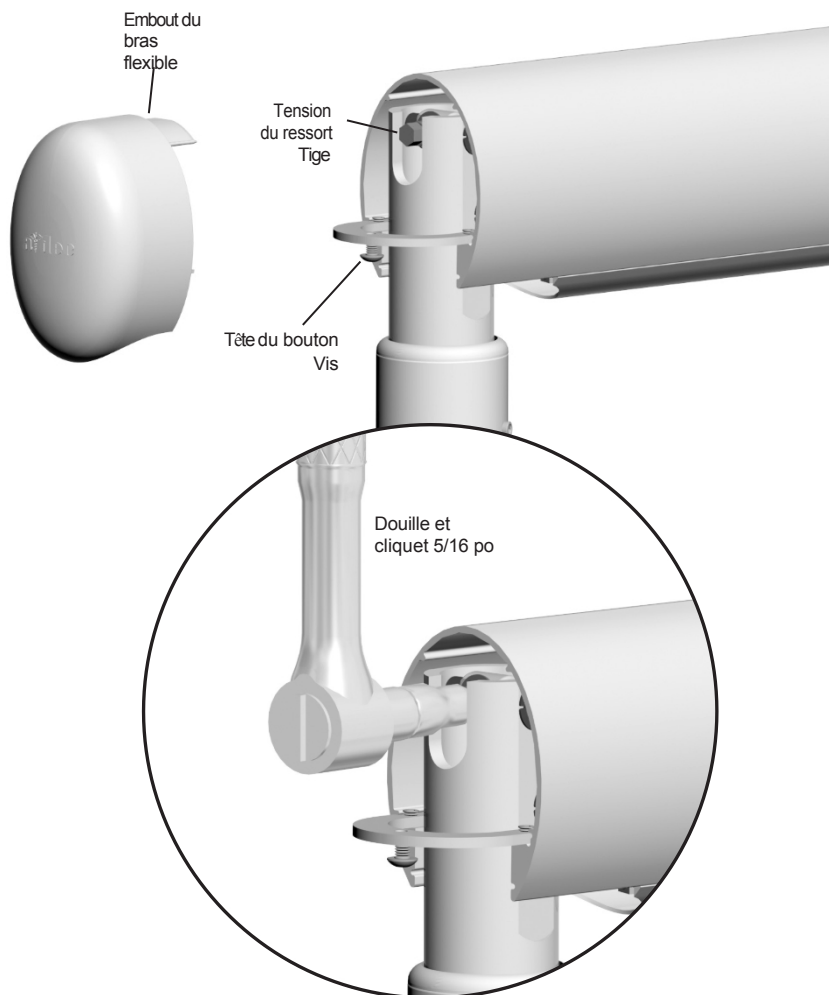

Si la tête de commande tombe ou remonte rapidement lorsque vous basculez le commutateur principal en position d'arrêt, procédez comme suit pour régler la tension du ressort du bras flexible :

1. Placez le commutateur principal en position « on ».
2. Chargez la tête de commande pour une utilisation normale, en fixant les pièces à main et en plaçant un plateau sur le support de plateau.
3. Positionnez la tête de commande de manière à ce que le bras flexible soit à niveau.
4. À l'aide d'une clé hexagonale de 1/8 po, desserrez la vis à tête bombée qui fixe le capuchon d'extrémité le plus éloigné de la tête de commande, puis retirez le capuchon en le tirant vers l'extérieur.
5. Placez le commutateur principal en position d'arrêt.
6. À l'aide d'une douille de 5/16 po et d'un cliquet, réglez la tige de tension du ressort du bras flexible jusqu'à ce que la tête de commande se soulève progressivement lorsque vous basculez le commutateur principal en position d'arrêt.
 - Si la tête de commande se soulève rapidement, tournez la tige dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - Si la tête de commande s'abaisse, tournez la tige dans le sens horaire.

Réglage de la tension du bras flexible (système 342pro uniquement)

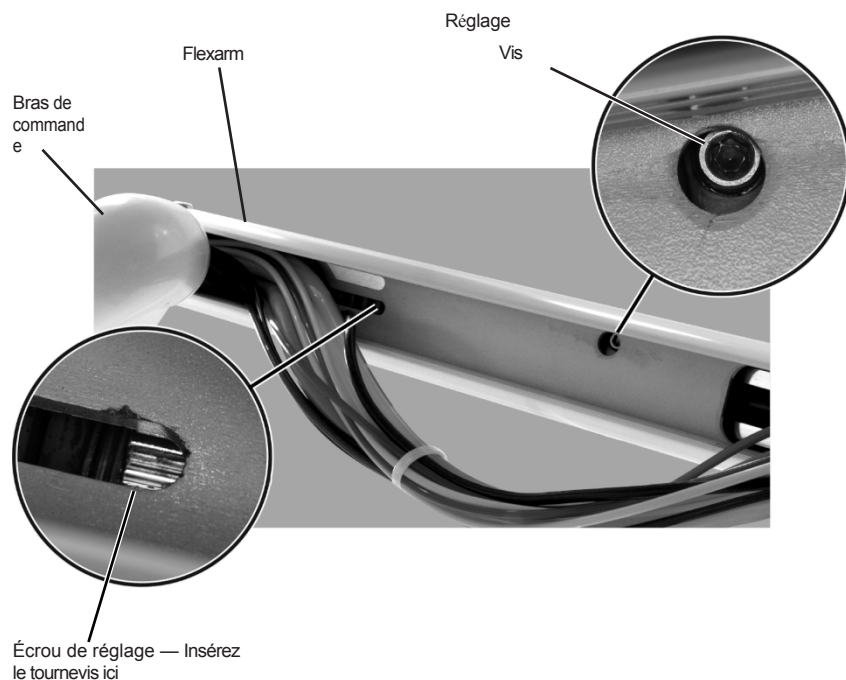


1. Chargez la tête de commande pour une utilisation normale. Fixez les pièces à main. S'il y a un support de plateau, placez un plateau avec des instruments sur le support de plateau.
2. Déplacez la tête de commande vers la position la plus basse.
3. Vérifiez si la tête de commande dérive.
4. Retirez le couvercle situé sous le bras flexible.
5. Assurez-vous que le tuyau est suffisamment lâche pour pouvoir accéder à la partie inférieure du bras flexible.
6. Relevez le bras flexible pour accéder aux éléments suivants :
 - **Écrou de réglage** : un ressort qui contrebalance le poids de la tête de commande.
 - **Vis de réglage** : mécanisme à friction qui maintient la position verticale de la tête de commande.
7. Pour régler le contrepois, insérez un tournevis standard dans l'écrou de réglage :
 - Si la tête de commande remonte, tournez l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - Si la tête de commande dérive vers le bas, tournez l'écrou dans le sens horaire.
8. Une fois le contrepois réglé, déplacez le bras vers les positions haute et basse, en relâchant la tête de commande à chaque position. Si le bras flexible dérive dans l'une ou l'autre position, utilisez une clé hexagonale de 5/32 po pour serrer la vis de réglage.



ATTENTION Ne serrez pas trop la vis de réglage, car vous risqueriez d'endommager le mécanisme de friction.

Nettoyage/Entretien

Rinçage des tuyaux de la pièce à main

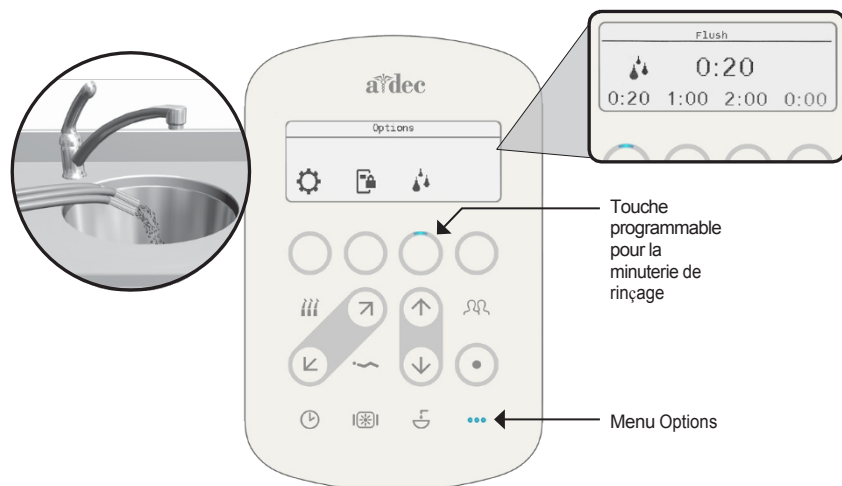

REMARQUE Rincez tous les tuyaux de la pièce à main (conduites d'air et d'eau) conformément à la réglementation en vigueur dans votre région. En l'absence de réglementation n'existe pas, rincez les tuyaux pendant au moins 20 à 30 secondes au début de la journée et après chaque patient.

Systèmes avec panneau de commande CP5i

Utilisez la fonction de rinçage du panneau de commande pour faire passer un volume important d'eau dans le tuyau de la pièce à main. Pour rincer le tuyau après chaque patient :

1. Débranchez les pièces à main et maintenez le tuyau au-dessus d'un évier, d'un crachoir ou d'un bassin.
2. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche d'●●●s pour accéder au menu **Options**.
3. Appuyez sur la touche programmable sous « » (**Temporisation de rinçage**) pour régler la minuterie de rinçage.
4. Sélectionnez la touche programmable correspondant à la durée de rinçage souhaitée. (Remarque : pour plus d'informations sur les options de la minuterie de rinçage, consultez le mode d'emploi des écrans tactiles et des pavés de commande A-dec.)

Systèmes avec CP5 ou sans panneau de commande

Utilisez le commutateur de rinçage situé à l'arrière de la tête de commande pour faire passer un volume important d'eau dans le tuyau de la pièce à main. Pour rincer le tuyau après chaque patient :

1. Débranchez les pièces à main.
2. Débranchez les pièces à main et maintenez le tuyau au-dessus d'un évier, d'un crachoir ou d'un bassin.
3. Maintenez le bouton de rinçage enfoncé pendant 20 à 30 secondes.

Entretien le collecteur d'huile



Entretenez le collecteur d'huile du système d'alimentation une fois par semaine en cas d'utilisation normale et plus souvent en cas d'utilisation intensive. Pour l'entretien :

1. Détachez le couvercle du collecteur d'huile de la tête de commande et jetez la vieille gaze. Ne retirez pas le silencieux en mousse.
2. Pliez un nouveau tampon de gaze (51 mm x 51 mm) en quatre et placez-le à l'intérieur du couvercle.
3. Fermez le couvercle du collecteur d'huile.

Nettoyez l'éjecteur de salive *(systèmes 336pro uniquement)*.




IMPORTANT Pour connaître les instructions d'utilisation et de nettoyage de l'éjecteur de salive, consultez le *mode d'emploi des systèmes de support A-dec 300* (réf. 86.0308.00) disponible dans le Centre de ressources à l'adresse www.a-dec.com.



Scannez, appuyez ou cliquez ici pour accéder rapidement à ce document en ligne.

Protéger à l'aide de barrières

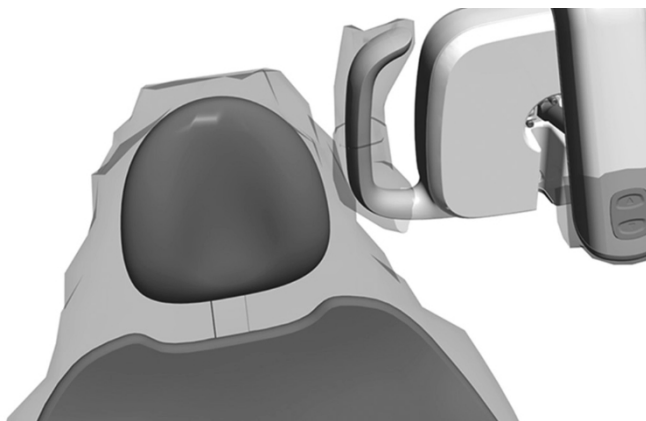

REMARQUE Pour une utilisation et une élimination appropriées des barrières, consultez les instructions fournies par le fabricant.

A-dec recommande d'utiliser des barrières de protection pour toutes les surfaces de contact et de transfert applicables. Les surfaces de contact sont les zones qui entrent en contact avec les mains et deviennent des points de contamination croisée potentiels pendant les procédures dentaires. Les surfaces de transfert sont les zones qui entrent en contact avec les instruments et autres objets inanimés.

Aux États-Unis, les barrières doivent être fabriquées conformément aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (CGMP) spécifiées par la Food and Drug Administration (USFDA). Pour les régions situées en dehors des États-Unis, veuillez vous reporter à la réglementation relative aux dispositifs médicaux spécifique à votre région.



IMPORTANT Pour obtenir des recommandations sur le nettoyage et la désinfection chimique des surfaces de contact et de transfert (lorsque la protection par barrière n'est pas applicable ou lorsque les barrières sont compromises), veuillez consulter le *guide d'asepsie des équipements A-dec* (réf. 85.0696.00).

Entretien de la ligne d'eau



A-dec recommande d'utiliser le traitement choc pour conduites d'eau A-dec ICX Renew®* avant d'utiliser le système pour la première fois.

Pour l'entretien continu de la conduite d'eau, A-dec recommande un protocole en trois parties :

- Utilisation continue des comprimés de traitement des conduites d'eau A-dec ICX®.
- Surveillance régulière de la qualité de l'eau dans votre équipement dentaire
- Traitement choc chaque fois que les résultats des tests dépassent le niveau d'action que vous avez établi pour la qualité de l'eau




IMPORTANT Pour obtenir des informations complètes sur la manière de maintenir une bonne qualité de l'eau, consultez le mode d'emploi fourni avec vos produits d'entretien des conduites d'eau A-dec. Pour accéder rapidement à ces documents en ligne, scannez, appuyez ou cliquez sur le code QR ci-dessous.



* Remarque : ICX Renew peut être commercialisé sous différents noms selon les régions.

Remplacer l'ampoule du tube à fibre optique

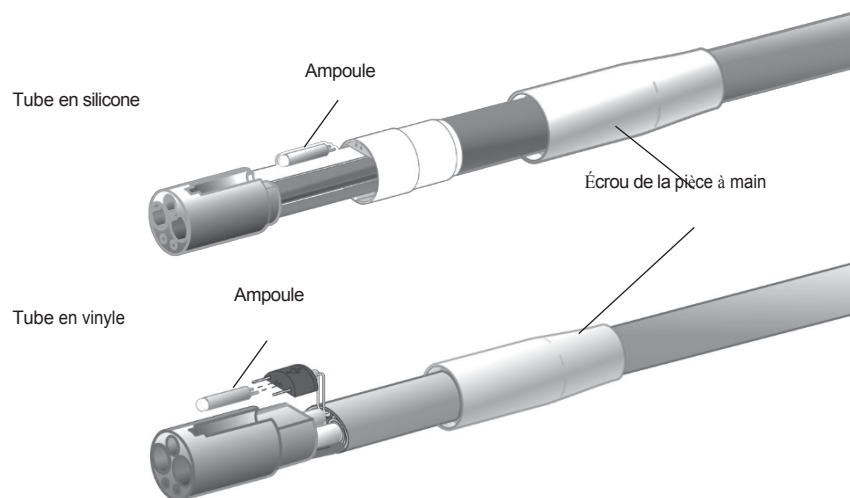


IMPORTANT Pour remplacer les ampoules de vos pièces à main ou raccords rapides, consultez le mode d'emploi de votre pièce à main.

Pour remplacer l'ampoule de votre tube en silicone ou en vinyle à 5 trous à fibre optique :

1. Débranchez la pièce à main et le raccord rapide du tube.
2. Retirez l'écrou métallique de la pièce à main.
3. Faites glisser vers l'arrière la partie métallique de la borne de la pièce à main (tube en silicone uniquement).
4. Remplacez l'ampoule.
5. Réinsérez la partie métallique de la borne dans la partie en plastique (tube en silicone uniquement).
6. Remettez délicatement l'écrou de la pièce à main sur la borne.


Accès aux utilitaires

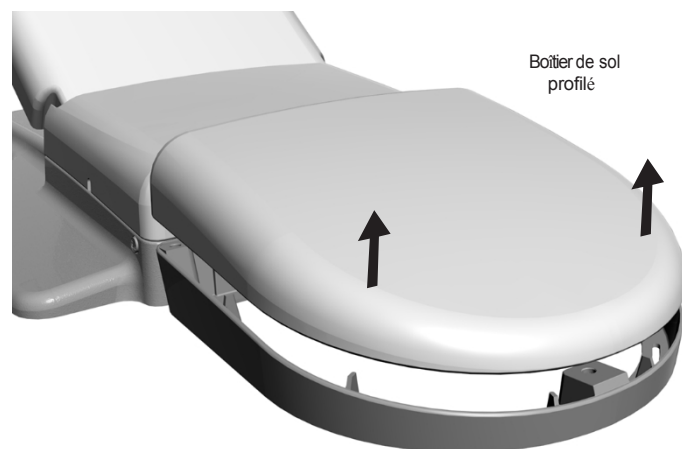

AVERTISSEMENT Risque d'électrocution. Lorsque vous retirez ou remplacez les couvercles, veillez à ne pas endommager les câbles ou les tubes. Vérifiez que les couvercles sont bien fixés après les avoir remplacés.

Les utilitaires du système se trouvent dans le boîtier encastré au sol pour les systèmes montés sur fauteuil (332pro/333pro/334pro/335pro/336pro), ou dans l'armoire ou le boîtier encastré au sol pour les systèmes à livraison latérale (342pro). Pour y accéder, soulevez le couvercle du boîtier encastré au sol ou le panneau amovible de l'armoire. Pour l'entretien, contactez votre revendeur A-dec agréé local.

Spécifications

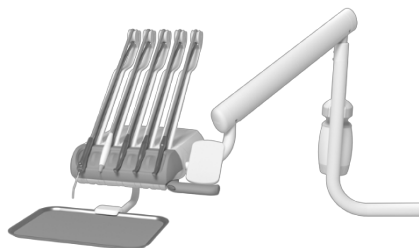

Charge des accessoires du système

Capacité de charge maximale des accessoires : 4 lb (1,8 kg)
(en plus des accessoires intégrés)

Raccords pour embouts d'éjecteur de salive A-dec *(système d'alimentation 336pro uniquement)*

SE standard 6 mm : Ouverture de 6 mm (0,236") de diamètre
(pour embouts SE standard)



IMPORTANT Pour les spécifications électriques, l'identification des symboles et les autres exigences réglementaires, consultez le document *Informations réglementaires, spécifications et garantie* (réf. 86.0221.00) disponible dans le Centre de ressources à l'adresse www.a-dec.com.



Pour accéder rapidement à ce document en ligne, scannez, appuyez ou cliquez sur ce code QR, qui renvoie vers : a-dec.com/regulatory-guide.



REMARQUE Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les exigences peuvent varier en fonction de votre emplacement. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur A-dec agréé.



Siège social d'A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
États-Unis
Tél. : 1.800.547.1883 aux États-Unis/Canada
Tél. : +1.503.538.7478 hors États-Unis/Canada
www.a-dec.com

A-dec Australie

Unit 8, 5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020 Australie
Tél. : 1.800.225.010 depuis l'Australie
Tél. : +61.(0).2.8332.4000 depuis l'étranger

A-dec Royaume-Uni Austin House,
11 Liberty Way Nuneaton, Warwickshire
CV11 6RZ Angleterre
Tél. : 0800.ADEC.UK (2332.85) depuis le
Royaume-Uni Tél. : +44.(0).24.7635.0901
depuis l'étranger



0297

ÍvÈ.Ç)7È.00d □ |||

86.0923.00 Rév. F
Date de publication
04/02/2026 Copyright 2026 A-
dec, Inc. Tous droits réservés.

IFUnewcov5