

Préparation de l'équipement A-dec® pour le rachat

Avant de commencer

Utilisez cette liste de vérification pour préparer votre équipement A-dec pour le retour. Veuillez noter que si vous achetez de l'équipement A-dec neuf, votre distributeur s'occupera du retrait de votre équipement actuel. Si vous n'achetez pas un équipement A-dec neuf, il vous incombe, en tant que propriétaire de l'équipement, de le préparer pour le ramassage.


Envoyez un courriel à buyback@a-dec.com pour planifier le ramassage de votre équipement A-dec.

Rassemblez ensuite les fournitures et les outils suivants :

- désinfectant en vaporisateur;
- mousse isolante à pulvériser;
- douille et clé à cliquet (pour retirer les ancrages au sol de la chaise et les ancrages du boîtier de sol);
- clé à molette ou pinces (pour débrancher l'air et l'eau du bâtiment);
- emballage rétrécissable;
- ruban adhésif;
- palette.

Mise hors service

- Essuyer et désinfecter toutes les surfaces extérieures.
- Videz la bouteille d'eau et purgez toutes les conduites d'eau avec de l'air (seringues et pièces à mains).
- Rincez les conduites de la succion à haut volume (HVE) et de la pompe à salive, en laissant les tubes branchés.
- Ne coupez pas les câbles ou les tubes.
- Il n'est pas nécessaire de rebrancher les câbles ou les tubes débranchés.
- Retirez le couvercle de la pompe et soulevez le couvercle du bras pour accéder à l'ancrage au sol (le cas échéant). Tous les couvercles doivent être réinstallés avant l'expédition.
- Retirez l'ancrage au sol de la chaise (s'il y a lieu).
- Placez la base de la chaise complètement vers le bas, le dossier vers le haut.

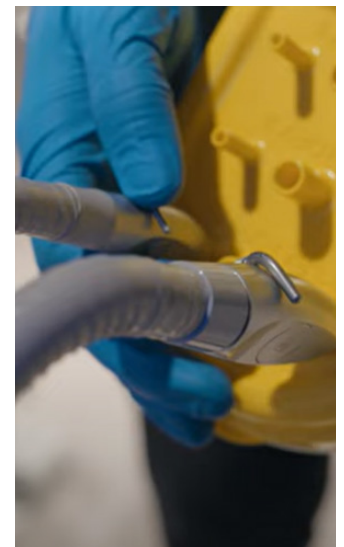

Remarque : Les colis doivent être entièrement remontés pour être ramassés par le transporteur; cela protégera l'équipement contre les dommages pendant le transport afin de vous assurer d'en recevoir la pleine valeur.

Déconnexion

- ❑ Débranchez le tube de succion du bâtiment et bouchez-le avec de la mousse isolante.
- ❑ Fermez les vannes d'arrêt air/eau (vannes d'arrêt) et débranchez le(s) régulateur(s).
- ❑ Débranchez le système de l'alimentation et des données (ne coupez pas les fils ou les câbles sur le produit).
- ❑ Retirez la boîte de jonction pour l'expédier avec la chaise.



Positionner le colis

- ❑ Redressez la chaise et réglez le frein pivotant.
- ❑ Rassemblez le tube et le ou les câbles d'alimentation de l'avant de la chaise et fixez-les au bout de la chaise avec du ruban adhésif.
- ❑ Placez la boîte de jonction au centre du siège de la chaise, côté couvert vers le bas.
- ❑ Placez la pédale de commande et la commande de la chaise au pied dans la boîte de jonction.
- ❑ Soulevez les accoudoirs pour aider à contenir la boîte de jonction.
- ❑ Positionnez le système de livraison dans le siège de la chaise.
- ❑ Placez la tête d'éclairage près de l'appuie-tête.



Emballer et déplacer

- ❑ Emballez le colis à l'aide de cellophane, en fixant tous les bras et composants (y compris la succion à haut volume et la pompe à salive).
- ❑ Chargez le colis sur un chariot en le faisant basculer vers l'avant et en inclinant le chariot sous la chaise. Tirez le colis vers le bas tout en glissant le chariot complètement sous la base pour plus de stabilité.
- ❑ Déplacez le colis à l'endroit où il sera ramassé.
- ❑ Chargez le colis sur la palette.
- ❑ Étiquetez le colis avec le numéro de devis et cette liste de vérification remplie.



Avez-vous des questions?

Envoyez-les à buybacka-dec.com ou communiquez avec votre gérant de territoire A-dec.

85.1065.28/E-only/1-25/Rev A

