

A-dec® Flush Dock

Vous préparer pour votre prochain patient est désormais plus facile.

Parfois, une solution simple est la meilleure solution. Prenez par exemple A-dec Flush Dock. Avec des fentes de support pour les pièces à main et les seringues A-dec, vous pouvez rincer, purger et suivre systématiquement le protocole recommandé des conduites d'eau, tout en gardant les mains libres pour d'autres tâches importantes. C'est aussi simple que ça.

Lorsque chaque minute compte, comptez sur A-dec Flush Dock.

MAINS LIBRES – Jumelé à la fonction de rinçage programmée du A-dec 500 Pro ou 300 Pro, le Flush Dock fournit au personnel une solution mains libres qui ne nécessite pas d'évier, de succion haut volume ou de crachoir. Il est portable, autonome et facile à déplacer entre les salles de soins. À la fin de la journée, rincez simplement et répétez.

AUTOMATIQUE – Lorsqu'une seringue est insérée dans le support, une fonction intégrée enfonce le bouton d'eau, déclenchant automatiquement le rinçage de la seringue. Les conduites d'eau des pièces à main peuvent être démarrées en maintenant le bouton de rinçage enfoncé ou au moyen de la fonction de rinçage programmée sur les panneaux de commande DS7 et CP5i (Pro), ce qui permet à des minuteries de rinçage personnalisées et prédéfinies de démarrer le processus. Une fois le Flush Dock en place, il ne reste plus qu'à lancer le processus de rinçage.

UNIFORME – Facile d'utilisation, efficace et uniforme, le Flush Dock contribue à renforcer la santé et la sécurité de l'entretien des conduites d'eau et peut également être utilisé pour purger les conduites d'eau de l'unité dentaire après les traitements de choc de l'appareil A-dec ICX Renew®.

Caractéristiques principales :

- La poche de seringue est spécialement conçue pour maintenir enfoncé le bouton d'eau de la seringue A-dec (seringues A-dec uniquement).
- Les supports de pièce à main peuvent accueillir un large éventail d'écrous et d'extrémités de tubes de pièce à main.
- Le dessus du couvercle est amovible pour nettoyer facilement les fentes du support.
- Le couvercle peut accueillir deux seringues de type Traditional ou une de type Continental®, permettant au docteur et à l'assistant de rincer en même temps, ainsi que quatre fentes pour pièces à main (retirez toutes les pièces à main, les moteurs et les coupleurs pour le rinçage).



Contactez votre représentant A-dec pour en savoir plus.